


定期点検記録表 機種：HBP-9020/HBP-9021

保守点検マニュアル
3723210-0B

点検日	2024年 1月 17日	総合判定： <input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 預かり点検推奨 <input type="checkbox"/> 修理必要	点検者	
製造番号	023787LF	設置場所		
特記事項				
本体時刻修正 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			【交換部品】 カフカバー <input checked="" type="checkbox"/>	

点検項目	判定	処置
外観検査	本体：機能上問題となる傷、汚れなど	良・否 ✓
	付属品：機能上問題となる傷、汚れなど	良・否 ✓
	清掃	良・否 ✓
全体検査	セルフテスト	良・否 ✓
	日付・時刻表示が正しい(設定可能)	良・否 ✓
安全検査	非常停止スイッチテスト	良・否 ✓
操作表示機能検査	プリンタテスト	良・否 ✓
	表示テスト	良・否 ✓
	サウンドテスト	良・否 ✓
	人検知センサテスト(*1)	良・否
測定機能検査	NIBP機能	
	測定カフ圧力検定テスト(自動巻付け)	
	0mmHg	0 mmHg 良・否 ✓
	140mmHg	141 mmHg 良・否 ✓
	280mmHg	283 mmHg 良・否 ✓
	測定カフ過大圧テスト	
		296 mmHg 良・否 ✓
	巻付けカフ圧力検定テスト	
	301 mmHg 良・否 ✓	
巻付けカフ漏気テスト		
	7 mmHg 良・否 ✓	
備考		

点検項目	判定	処置
複合テスト		
巻付け時間	15.5 sec 良・否 ✓	
加圧時間	11.1 sec 良・否 ✓	
排気速度		
250mmHg	5.9 mmHg/sec 良・否 ✓	
140mmHg	5.9 mmHg/sec 良・否 ✓	
50mmHg	5.1 mmHg/sec 良・否 ✓	
急速排気時間	1.7 sec 良・否 ✓	
測定カフ漏気	1.8 mmHg 良・否 ✓	
印字のかすれ、印字ズレ	良・否 ✓	
実測テスト		
	良・否 ✓	
電気的安全性検査		
外装漏れ電流NC	0.00 / mA 良・否 ✓	
外装漏れ電流SFC	0.00 / mA 良・否 ✓	

処置欄：✓確認 /対象外 ○部品交換
(*1)HBP-9021のみ