

定期点検記録表

機種

HB P-9020/ HB P-9021

保守点検マニュアル

3723210-0B

点検日	2025年2月25日	総合判定:	☒ 異常なし	☐ 預かり点検推奨	☐ 修理必要	点検者	川島
製造番号	023787LF	設置場所					
特記事項							
本体時刻修正 有・無						【交換部品】 カフカバー ✓	

点検項目		判定	処置
外観検査	本体:機能上問題となる傷、汚れなど	良・否	✓
	付属品:機能上問題となる傷、汚れなど	良・否	✓
	清掃	良・否	✓
全体検査	セルフテスト	良・否	✓
	日付・時刻表示が正しい(設定可能)	良・否	✓
安全検査	非常停止スイッチテスト	良・否	✓
操作表示機能検査	プリンタテスト	良・否	✓
	表示テスト	良・否	✓
	サウンドテスト	良・否	✓
	人検知センサテスト(*1)	良・否	
測定機能検査	NIBP機能		
	測定カフ圧力検定テスト(自動巻付け)		
	0mmHg	0 mmHg	良・否 ✓
	140mmHg	140 mmHg	良・否 ✓
	280mmHg	282 mmHg	良・否 ✓
	測定カフ過大圧テスト		
		297 mmHg	良・否 ✓
	巻付けカフ圧力検定テスト		
		305 mmHg	良・否 ✓
	巻付けカフ漏気テスト		
		5 mmHg	良・否 ✓
測定機能検査	複合テスト		
	巻付け時間	14.8 sec	良・否 ✓
	加圧時間	16.8 sec	良・否 ✓
	排気速度		
	250mmHg	5.8 mmHg/sec	良・否 ✓
	140mmHg	5.9 mmHg/sec	良・否 ✓
	50mmHg	5.6 mmHg/sec	良・否 ✓
	急速排気時間	2.0 sec	良・否 ✓
	測定カフ漏気	2.2 mmHg	良・否 ✓
	印字のかすれ、印字ズレ		良・否 ✓
電気的安全性検査	実測テスト		良・否 ✓
	外装漏れ電流NC	0.001 mA	良・否 ✓
	外装漏れ電流SFC	0.001 mA	良・否 ✓
備考			

処置欄:✓確認 / 対象外

○部品交換

(点検者控)

(*1)HB P-9021のみ