

定期点検記録表 機種: HBP-9020/HBP-9021保守点検マニュアル
3723210-0B

点検日	2025年4月14日	総合判定:	☒ 異常なし	☐ 預かり点検推奨	☐ 修理必要	点検者	
製造番号	023791LF	設置場所					
特記事項							
本体時刻修正							☒ 有 ☐ 無
【交換部品】							
カフカバー							☒

点検項目		判定	処置
外観検査	本体:機能上問題となる傷、汚れなど	☒ 良 ☐ 否	✓
	付属品:機能上問題となる傷、汚れなど	☒ 良 ☐ 否	✓
	清掃	☒ 良 ☐ 否	✓
全体検査	セルフテスト	☒ 良 ☐ 否	✓
	日付・時刻表示が正しい(設定可能)	☒ 良 ☐ 否	✓
安全検査	非常停止スイッチテスト	☒ 良 ☐ 否	✓
操作表示機能検査	プリンタテスト	☒ 良 ☐ 否	✓
	表示テスト	☒ 良 ☐ 否	✓
	サウンドテスト	☒ 良 ☐ 否	✓
	人検知センサテスト(*1)	☒ 良 ☐ 否	✓
測定機能検査	NIBP機能		
	測定カフ圧力検定テスト(自動巻付け)		
	0mmHg	0 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
	140mmHg	140 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
	280mmHg	280 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
	測定カフ過大圧テスト		
		299 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
	巻付けカフ圧力検定テスト		
		301 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
	巻付けカフ漏気テスト		
		8 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
電気的安全性検査	測定機能検査		
	複合テスト		
	巻付け時間	16.4 sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	加圧時間	17.5 sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	排気速度		
	250mmHg	6.0 mmHg/sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	140mmHg	6.0 mmHg/sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	50mmHg	5.4 mmHg/sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	急速排気時間	1.9 sec	☒ 良 ☐ 否 ✓
	測定カフ漏気	2.1 mmHg	☒ 良 ☐ 否 ✓
備考	印字のかすれ、印字ズレ		☒ 良 ☐ 否 ✓
	実測テスト		☒ 良 ☐ 否 ✓
	外装漏れ電流NC		0.001 mA ☒ 良 ☐ 否 ✓
	外装漏れ電流SFC		0.001 mA ☒ 良 ☐ 否 ✓

処置欄: ✓ 確認 / 対象外 ○ 部品交換

(*1) HBP-9021 のみ

(点検者控)